



OMRON

Руководство по эксплуатации
**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР)
OMRON AC ADAPTER-S (60240HW5SW)**

Предназначен для питания от электрической сети
напряжением 220В автоматических измерителей
артериального давления и частоты пульса OMRON*



EAC

Благодарим Вас за покупку!

* Смотрите Руководство по эксплуатации к Вашему прибору

All for Healthcare

Подтверждение соответствия

Сертификат соответствия № TC RU C-JP.АЛ16.А.05368.

Срок действия не ограничен.

Соответствует требованиям Технических регламентов

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности

низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств».

Срок службы – 7 лет.

Правила пользования

1. Соедините штекер блока питания с гнездом внешнего питания измерителя артериального давления.
2. Подсоедините силовую вилку адаптера к розетке внешней электрической сети.

Меры предосторожности

1. Не допускайте сгибов, переломов шнура адаптера.
2. Не допускайте проникновения влаги в корпус адаптера.
3. Не производите самостоятельную разборку или ремонт адаптера.
4. Не оставляйте адаптер включенным в сеть на длительное время.

В случае обнаружения дефекта, обращайтесь в гарантийную мастерскую.

Технические характеристики

Модель AC ADAPTER-S (60240HW5SW)
Электрическая сеть 100-240 В, 50/60Гц/0,12А
Выходное напряжение 6V DC/500mA
Условия эксплуатации:
 температура окружающего воздуха от -10 до 50 °C
 относительная влажность от 15 до 90%
Условия транспортирования и хранения
 температура окружающего воздуха от -25 до 65 °C
 относительная влажность от 5 до 95%

Комплект поставки

Блок питания — 1 шт.
Упаковочная коробка — 1 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 шт.

ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Адаптер сетевой модель AC ADAPTER S (60240HW5SW) предназначен только для электропитания автоматических измерителей артериального давления и частоты пульса OMRON и не может использоваться для электропитания других электрических приборов.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону бесплатной горячей линии по России: **8-800-555-00-80** или посетите наш интернет сайт по адресу: **www.csmedica.ru**

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем авторизованном сервисном центре, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание приборов OMRON, по телефону горячей линии.

**Надлежащая утилизация прибора
(использованное электрическое и электронное
оборудование)**

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его отдельно.

лизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

Дата производства

Дата производства зашифрована в номере ЛОТ, который находится на корпусе адаптера: первая цифра обозначает год производства, вторая цифра или буква – месяц производства (цифры 1–9 обозначают месяцы с января по сентябрь, буквы O, N, D обозначают месяцы с октября по декабрь).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (ОМРОН ХЭЛСКЭА Ко., Лтд.)
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
(53, Кунотсубо, Терато-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ)
на производственном подразделении «MITSUMI PHILIPPINES,
INC.» (МИТСУМИ ФИЛИППИНЕС, ИНК.), Luzon Avenue, The Freeport
Area of Bataan (FAB), Mariveles, Bataan, Philippines (Лузон Авеню,
Фрипорт Эреа оф Батаан (ФЭБ), Маривелес, Батаан, Филиппины)
Сделано в Филиппинах

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ:

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (ОМРОН ХЭЛСХЭА ЕВРОПА Б.В.)
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS
(Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ)
www.omron-healthcare.com



ЗАО «КомплектСервис» —
эксклюзивный дистрибьютор и импортер
медицинской техники OMRON в России

Юридический адрес:

123557, Москва, Большой Тишинский переулок, д. 26, корп. 13-14

По вопросам реализации и закупок обращайтесь
по адресу: 125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4
Тел/факс: (495) 987-18-92, 987-18-93

По вопросам сервиса обращайтесь по адресу:
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел/факс: (499) 995-11-32 (многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России:
8-800-555-00-80

E-mail: csinfo@csmedica.ru,
service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Штамп магазина

Подпись продавца _____

Изделие во всех режимах работы
проверялось в присутствии покупателя

Подпись покупателя _____

СРОК ГАРАНТИИ 24 МЕСЯЦА

Условные обозначения

	Производитель
	Уполномоченный представитель в ЕС
	Изделие класса II Защита от поражения электрическим током
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Технология качества Японии
	Полярность разъема адаптера
	Для использования только внутри помещений
	Надлежащая утилизация продукта (отработанное электрическое и электронное оборудование)
	Знак соответствия директиве ЕС
	Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза

D03.M03.G2016